

# Gebrauchsanweisung

## Platzhalter

Ref. [TF26]

[Hilfsteile]

Revisionsdatum: [02/10/2023]

Die Verarbeitung, Anwendung, Aktivierung, Deaktivierung, Reparatur und regelmäßige Wartung von Attachments sollten nur von Fachleuten/geschultem Personal unter Verwendung von Originalinstrumenten und -komponenten durchgeführt werden. Die mechanische Reinigung von Attachments mit einer Zahnbürste und Zahnpaste kann zu einem vorzeitigen Verschleiß der Funktionsteile führen.

Mit Erscheinen dieser Anweisung verlieren alle früheren Anweisungen ihre Gültigkeit.

Der Hersteller lehnt jegliche Haftung für Schäden ab, die durch Nichtbeachtung dieser Gebrauchsanweisung entstehen.

## Allgemeines

### Rückverfolgbarkeit von Chargennummern

Wenn Attachments aus Komponenten mit unterschiedlichen Chargennummern zusammengesetzt werden, müssen alle relevanten Chargennummern aufgezeichnet werden, um ihre Rückverfolgbarkeit zu gewährleisten.

### Präparation von Attachments beim Einsatz von Platzhaltern

Keine besonderen Verfahren erforderlich. Bitte beachten Sie die beim Zusammensetzen des kompletten Attachments die in den Anwendungshinweisen beschriebene Vorgehensweise auf Seite 3. Alle technischen Verfahren werden gemäß der Berufsausbildung eines Zahnarztes bzw. eines Zahntechnikers durchgeführt.

### Metallgerüst

Wie bei bilateralen Interdental- und Freundprothesen sollte der Transversalbügel aus einer gegossenen Transpalatinalplatte für den Oberkiefer und einem Sublingualbügel für den Unterkiefer bestehen. Es ist wichtig, dass die Prothesenbasis absolut starr ist (nicht zurückfedert).

### Zerlegung (Auseinandernehmen) von Attachments

Die Patrizen- und Matrizenteile von Attachments müssen vor dem Erhitzen (Angießen, Löten, Laserschweißen, Vergüten und Aufbrennen von Keramik) getrennt und – wenn sie aus mehreren Komponenten bestehen – vollständig voneinander separiert werden.

### Dublierhilfsteile

Die Dublierhilfsteile sind für bestimmte Komponenten minimal größer im Durchmesser als die Originalkomponenten, um einen optimalen Spalt für das Dublieren sowie das Verkleben zu schaffen.

**Bitte beachten Sie:** Das Dublierhilfsteil darf nicht als provisorischer Ersatz der Matrize in den Mund des Patienten gesetzt werden.



ALPHADENT NV  
Mannebeekstraat 33  
8790 Waregem, Belgium  
T +32 56 629 531



# Gebrauchsanweisung

## Platzhalter

Ref. [TF26]

[Hilfsteile]

Revisionsdatum: [02/10/2023]

## Desinfektion

Nach jeder Anfertigung oder Änderung muss die prothetische Arbeit, einschließlich der Matrize, gemäß den nationalen Richtlinien gereinigt und desinfiziert werden.

Bei der Auswahl des Desinfektionsmittels ist unbedingt darauf zu achten, dass es:

- für die Reinigung und Desinfektion von Zahnersatzteilen geeignet ist;
- mit den Materialien der zu reinigenden und zu desinfizierenden Produkte kompatibel ist;
- seine desinfizierende Wirkung bewiesen hat.

Alle Kunststoffteile müssen vor der Verwendung mit einem von der EPA zugelassenen Desinfektionsmittel desinfiziert werden.

Wir empfehlen eine CIDEX® OPA-Lösung.

Halten Sie sich strikt an die Anweisungen des Herstellers.

## Weitere Hinweise

Weitere Informationen zur Verarbeitung, Technik, usw. finden Sie auf unserer Website <https://www.ckpl.eu/> im Downloadbereich.

## Warnungen

### Allergien

Dieses Produkt darf nicht bei Patienten verwendet werden, bei denen eine Allergie gegen ein oder mehrere Bestandteile der Attachmentmaterialien bekannt ist. Bitte beachten Sie die Materialspezifikationen auf Seite 9. Bei Patienten, bei denen der Verdacht besteht, dass sie auf ein oder mehrere Bestandteile der Attachmentmaterialien allergisch reagieren, darf dieses Produkt nur nach vorheriger allergologischer Prüfung und dem Nachweis, dass keine Allergie vorliegt, verwendet werden.

Die Platzhalter können **Nickel** enthalten.

Bitte kontaktieren Sie Ihren CEKA PRECI-LINE-Vertreter für weitere Informationen.

### Vorsichtsmaßnahmen

- Die Teile werden unsteril geliefert. Die ordnungsgemäße Vorbereitung der Teile vor der Verwendung am Patienten wird im Abschnitt ‚Desinfektion‘ erläutert.
- Achten Sie auf eine regelmäßige Reinigung des Attachments, um eine Entzündung des Weichgewebes zu vermeiden.
- Bei der intraoralen Anwendung sollten alle Produkte generell gegen Aspiration gesichert werden.
- Im Mund des Patienten sollten keine Schneidearbeiten durchgeführt werden.



ALPHADENT NV  
Mannebeekstraat 33  
8790 Waregem, Belgium  
T +32 56 629 531



# Gebrauchsanweisung

## Platzhalter

Ref. [TF26]

[Hilfsteile]

Revisionsdatum: [02/10/2023]

### BESCHREIBUNG DES HILFSMITTELS UND ANWENDUNGSHINWEISE

Die von dieser Gebrauchsanweisung betroffene Hilfsteilegruppe umfasst die **Platzhalter der CEKA-, PRECI-CLIX- und PRECI-BAR-Produktreihen**. Die Platzhalter werden zusammen mit den CEKA PRECI-LINE-Patrizen und -Matrizen verwendet.

REF./PRODUKT-NUMMER	BESCHREIBUNG	MD-KLASSE	BILD
1251 B	PRECI-CLIX-PLATZHALTER 6 ST.	I	
694 B	CEKA M3-PLATZHALTER 0,3 MM 10 ST.	I	
RA 0055	REVAX M2-PLATZHALTER GROSS 0,4 MM 1 ST.	I	
RE 0096	REVAX M2 PLATZHALTER 10 ST.	I	
1101/PH	PRECI-BAR-PLATZHALTER GROSS 1 ST.	I	
1103/PH	PRECI-BAR-PLATZHALTER KLEIN 1 ST.	I	

### Funktionsbeschreibung

Der Platzhalter wird als Verarbeitungsteil bei der Verarbeitung des kompletten Attachments bzw. während der Abformung verwendet. Intraoral kommt er nur kurzfristig zum Einsatz. Er schafft Resilienz zwischen den zusammengesetzten Komponenten, ist aber beim Tragen des Zahnersatzes nicht Teil der endgültigen, individuell angefertigten Zahnprothese mit eingegliedertem Attachment.

Der Platzhalter wird als Hilfsmittel verwendet, um:

- einen Abstand zwischen der Patrize und der Matrize des Attachments zu schaffen;
- während der Verarbeitung des Attachments das Eindringen von Kunststoff in die Matrize zu verhindern;
- während der Abformung eine Negativform des Mundes des Patienten herzustellen.

Die CEKA-, PRECI-CLIX- und PRECI-BAR-Platzhalter sind, mit Ausnahme des ringförmigen Platzhalters # 1251 B, Metallscheiben oder verlängerte Abstandhalter aus Metall, die während der Verarbeitung zwischen die Retentionselemente gelegt werden, um Resilienz des mit CEKA-, PRECI-BAR- oder PRECI-CLIX-Komponenten



ALPHADENT NV  
Mannebeekstraat 33  
8790 Waregem, Belgium  
T +32 56 629 531



# Gebrauchsanweisung

## Platzhalter

Ref. [TF26]


[Hilfsteile]

Revisionsdatum: [02/10/2023]


verwendeten Halteelements zu schaffen.

Der ringförmige Platzhalter # 1251 B ist ein Gummiring, der während der Verarbeitung auf der PRECI-CLIX-Matrize platziert wird, um das Eindringen von Kunststoff in die Matrize zu verhindern, und nach der Verarbeitung des Attachments eine Schwenkbewegung erlaubt.

### Beispiel des ringförmigen Platzhalters # 694 B und # RE 0096

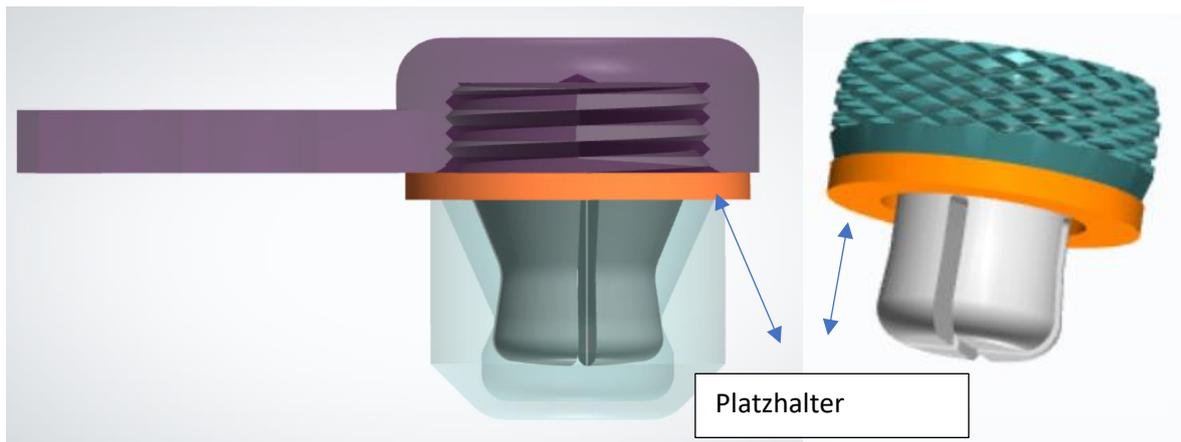

### Beispiel des ringförmigen Platzhalters # 1251 B

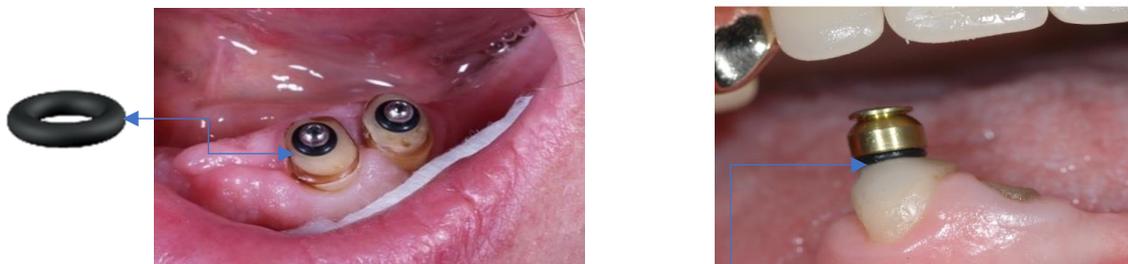

Runder, schwarzer Platzhalter aus EPDM (Gummi)



ALPHADENT NV  
Mannebeekstraat 33  
8790 Waregem, Belgium  
T +32 56 629 531

E [info@ckpl.eu](mailto:info@ckpl.eu)



RX ONLY

Seite 4 von 13

# Gebrauchsanweisung


## Platzhalter

Ref. [TF26]

[Hilfsteile]

Revisionsdatum: [02/10/2023]

### Beispiel des verlängerten Platzhalters aus Metall # 1101/PH und 1103/PH

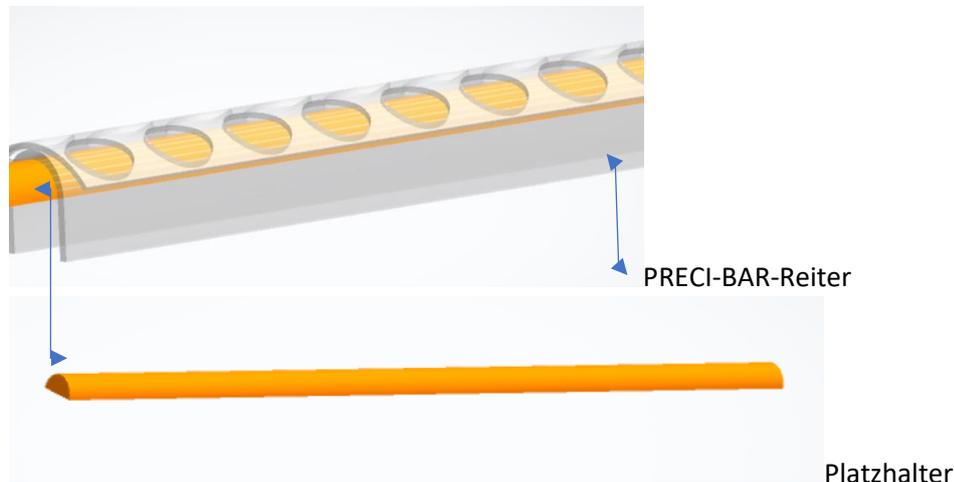

### WICHTIG

Diese Gebrauchsanweisung ist die neueste verfügbare Version. Bitte lesen und bewahren Sie sie sorgfältig auf.

### ANWENDUNGSBEREICH

Zahn- und zahn-/schleimhautgetragene Prothesen:

- interdental eingesetzter Zahnersatz;
- resilierende unilaterale und bilaterale Freierendprothesen;
- Prothesen mit einem Interdentalsattel und einer Freieindsituation/Einlegeprothese und Freienteile kombiniert;
- resilierende Stegkonstruktionen.

### KONTRAINDIKATIONEN

- Patienten mit einer bestehenden Allergie gegen ein oder mehrere Bestandteile der Attachmentmaterialien.
- Mangelnde Bereitschaft des Patienten, die Nachsorge-/Rückrufanweisungen korrekt zu befolgen.
- Patienten mit Bruxismus oder anderen unkontrollierten parafunktionellen Gewohnheiten.
- Unilateraler Zahnersatz ohne Transversalbügel.

Zum Zeitpunkt der Herausgabe dieser Gebrauchsanweisung sind keine unerwünschten Nebenwirkungen bekannt.

### VORSICHT

Die Wahl des Attachments wird vom Zahnarzt oder vom Zahntechniker entsprechend den prothetischen Bedürfnissen getroffen.

### FÜR EINE KORREKTE VERARBEITUNG ERFORDERLICHE GERÄTE UND HILFSTEILE

Produktspezifische Verarbeitungshilfsteile und Instrumente.



ALPHADENT NV  
Mannebeekstraat 33  
8790 Waregem, Belgium  
T +32 56 629 531



# Gebrauchsanweisung

**Platzhalter**

Ref. [TF26]

[Hilfsteile]

Revisionsdatum: [02/10/2023]

## MATERIAL

Die für diese Produkte verwendeten Materialien sind von hoher Qualität und entsprechen den europäischen und USA/FDA-Referenznormen.

Die Patienten sollten den Arzt über mögliche Allergien informieren. Bei allergischen Reaktionen ist die Ursache zu erforschen und zu beseitigen. Bei nachgewiesener Allergie gegen die Inhaltsstoffe des Produkts dürfen diese Produkte nicht verwendet werden.

REF./PRODUKT-NUMMER	BESCHREIBUNG	MATERIAL
1251 B	PRECI-CLIX-PLATZHALTER 6 ST.	EPDM (Gummi)
694 B	CEKA M3-PLATZHALTER 0,3 MM 10 ST.	Edelstahl 1.4310 gemäß EN 10088
RA 0055	REVAX M2-PLATZHALTER GROSS 0,4 MM 1 ST.	Zinn
RE 0096	REVAX M2 PLATZHALTER 10 ST.	Edelstahl 1.4310 gemäß EN 10088
1101/PH	PRECI-BAR-PLATZHALTER GROSS 1 ST.	Kupfer
1103/PH	PRECI-BAR-PLATZHALTER KLEIN 1 ST.	Kupfer

## WARNHINWEISE UND EINMALIGE VERWENDUNG

Diese Produkte sind Einwegprodukte. Ihre Wiederverwendung beeinträchtigt die mechanische Funktionalität und wirkt sich auf die Gesundheit des Patienten aus, z. B. durch das Risiko einer Infektion durch infektiöses Material, das von einem Patienten auf einen anderen übertragen wird. Diese Produkte können nur verwendet werden, nachdem sie gemäß den nationalen Vorschriften gereinigt und desinfiziert wurden, ohne dass ihre korrekte Funktion beeinträchtigt wird. ALPHADENT NV übernimmt keine Verantwortung für Schäden, die durch eine unsachgemäße Verwendung oder Wiederverwendung dieser Produkte entstehen.

## TRANSPORT, LAGERUNG UND VERFALLSDATUM

Achten Sie darauf, dass die Verpackung beim Transport nicht beschädigt wird. Lagern Sie das Produkt in der Originalverpackung an einem sauberen, trockenen Ort, geschützt vor Sonnenlicht und Wärmequellen. Einige dieser Produkte haben eine Haltbarkeitsdauer, siehe Produktetikett.

## REINIGUNG UND DESINFEKTION

Der Inhalt des Sets wird als NICHT STERIL verkauft. Es wird empfohlen, die vorgefertigten Metallteile mit heißem Wasser und nicht ätzenden neutralen Reinigungsmitteln sowie weichen Bürsten zu reinigen, um eine Beschädigung der Komponenten zu vermeiden. Chlorhaltige Reinigungsmittel sind zu vermeiden, da sie Oxide auf den Lasermarkierungen erzeugen können.

Die prothetische Arbeit, einschließlich der Patrizen- und Matrizenteile, muss nach jeder Anfertigung oder Änderung gemäß den nationalen Richtlinien gereinigt und desinfiziert werden. Bei der Auswahl des Desinfektionsmittels ist unbedingt darauf zu achten, dass:



ALPHADENT NV  
Mannebeekstraat 33  
8790 Waregem, Belgium  
T +32 56 629 531



# Gebrauchsanweisung

**Platzhalter**

Ref. [TF26]

[Hilfsteile]

Revisionsdatum: [02/10/2023]

- es mit den zu reinigenden und zu desinfizierenden Materialien der Produkte kompatibel ist;
- das Produkt seine Wirksamkeit bei der Desinfektion bewiesen hat;
- es für die Reinigung und Desinfektion von Zahnersatzteilen geeignet ist.

Alle Teile aus Kunststoff oder Metall müssen vor der Verwendung mit einem von der EPA zugelassenen Desinfektionsmittel desinfiziert werden. Wir empfehlen die Verwendung von CIDEX® OPA-Lösung. Befolgen Sie dabei die Anweisungen des Herstellers genau.

Der Zahnarzt ist für die Endreinigung verantwortlich.

## TECHNISCHE UNTERSTÜTZUNG

Die Mitarbeiter von ALPHADENT stehen Ihnen für technische Fragen unter den unten angegebenen Telefonnummer zur Verfügung. Sie finden unsere Kontaktdaten auch auf unserer Website [www.CKPL.eu](http://www.CKPL.eu). Weitere Informationen über die Verwendung dieser Produkte entnehmen Sie bitte dem Katalog, den Broschüren oder der Website.

## WARTUNG UND REGELMÄSSIGE PFLEGE

Die Zahnärzte sind dafür verantwortlich, dass die ordnungsgemäße Funktion und Retention der Attachments gewährleistet sind und die Sicherheit des Patienten durch ständige Wartung des Attachments sichergestellt ist. Um den hohen Qualitätsstandard der aktuellen Produkte zu erhalten und Funktionalitätsminderungen zu vermeiden, werden eine jährliche Wartung und eine regelmäßige Pflege empfohlen.

## LEITLINIEN FÜR DIE PATIENTEN

Dem Patienten wird empfohlen, die Anweisungen des Zahnarztes zu befolgen, sich einer regelmäßigen Kontrolle zu unterziehen und eine tägliche, sorgfältige Hygiene durchzuführen. Diese Produkte wurden nicht auf Sicherheit und Kompatibilität in der RM-Umgebung geprüft. Die Hilfsmittel wurden nicht auf Erwärmung, Migration oder Bildartefakte in der RM-Umgebung getestet.

Die Sicherheit dieser Produkte in der RM-Umgebung ist nicht bekannt. Das Scannen eines Patienten, der diese Produkte trägt, könnte zu Verletzungen des Patienten führen.

## ENTSORGUNG

Befolgen Sie die örtlichen Gesetze für die Entsorgung von Medizinprodukten.

## INHALT DER VERPACKUNGEN

Die vorliegenden Produkte werden sowohl als Einzelteile als auch als Teil eines Sets verkauft.



ALPHADENT NV  
Mannebeekstraat 33  
8790 Waregem, Belgium  
T +32 56 629 531



# Gebrauchsanweisung

Platzhalter

Ref. [TF26]

[Hilfsteile]

Revisionsdatum: [02/10/2023]

## SYMBOLLEGENDE

Symbol	Symbolbezeichnung	Symbolbeschreibung
	Hersteller	Zeigt den Hersteller des Medizinprodukts an.
	Herstellungsdatum	Zeigt das Datum an, an dem das Medizinprodukt hergestellt wurde.
	Bestellnummer/Artikelnummer	Zeigt die Katalognummer des Herstellers an, sodass das Medizinprodukt identifiziert werden kann.
	Unique Device Identification (UDI)	Die einmalige Produktkennung (UDI) ist ein eindeutiger numerischer oder alphanumerischer Code für ein Medizinprodukt.
	Chargencode	Zeigt die Chargenbezeichnung des Herstellers an, sodass die Charge oder das Los identifiziert werden kann.
	Verwendbar bis	Zeigt das Datum an, nach dem das Medizinprodukt nicht mehr verwendet werden darf.
	Anzahl	Zeigt die Menge (Stück) in der entsprechenden Verpackung an.
	(Elektronische) Gebrauchsanweisung beachten	Verweist auf die Notwendigkeit für den Anwender, die Gebrauchsanweisung zurate zu ziehen.
	Verschreibungspflichtig	Achtung! Gemäß dem Bundesgesetz der USA darf dieses Produkt nur auf Anordnung eines Arztes oder von einem Arzt erworben werden.
	CE-Kennzeichnung	Zeigt an, dass ein Medizinprodukt den Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutznormen für innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums verkaufte Produkte entspricht.
	CE-Kennzeichnung mit Kennnummer der Benannten Stelle	Gibt an, dass ein Medizinprodukt den Gesundheits-, Sicherheits- und Umweltschutznormen für innerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums verkaufte Produkte entspricht.



ALPHADENT NV  
Mannebeekstraat 33  
8790 Waregem, Belgium  
T +32 56 629 531



# Gebrauchsanweisung

Platzhalter

Ref. [TF26]

[Hilfsteile]

Revisionsdatum: [02/10/2023]

	Nicht wiederverwenden	Verweist auf ein Medizinprodukt, das für den einmaligen Gebrauch oder den Gebrauch an einem einzelnen Patienten während einer einzelnen Behandlung vorgesehen ist.
	Nicht verwenden, wenn die Verpackung beschädigt ist, und Gebrauchsanweisung beachten	Zeigt an, dass das betreffende Medizinprodukt nicht verwendet werden sollte, wenn die Verpackung beschädigt oder geöffnet wurde, und dass der Anwender die Gebrauchsanweisung lesen sollte, um zusätzliche Informationen zu erhalten.
	Unsteril	Zeigt ein Medizinprodukt an, das keinem Sterilisationsverfahren ausgesetzt wurde.
	Von Sonnenlicht fernhalten	Bezeichnet ein Medizinprodukt, das Schutz vor Lichtquellen benötigt.
	Temperaturbegrenzung	Bezeichnet die Temperaturwerte, denen das Medizinprodukt sicher ausgesetzt werden kann.
	Medizinprodukt	Zeigt an, dass das Produkt ein Medizinprodukt ist.
	Achtung! Informationsbeilage beachten	Verweist auf die Notwendigkeit für den Anwender, die Gebrauchsanweisung auf wichtige sicherheitsbezogene Angaben wie Warnhinweise und Vorsichtsmaßnahmen durchzusehen, die aus einer Vielzahl von Gründen nicht auf dem Medizinprodukt selbst angebracht werden können.

 ALPHADENT NV  
Mannebeekstraat 33  
8790 Waregem, Belgium  
T +32 56 629 531

# Gebrauchsanweisung

Platzhalter

Ref. [TF26]

[Hilfsteile]

Revisionsdatum: [02/10/2023]

## TECHNISCHE DATEN

REF. / PRODUKT-NUMMER	BESCHREIBUNG	ABMESSUNGEN	DICHTE	BELASTUNG
1251 B	PRECI-CLIX-PLATZHALTER	1,8 mm Durchmesser x 0,7 mm	1,12 ± 0,02 g/cm <sup>3</sup>	15,3 MPa
694 B	CEKA M3-PLATZHALTER 0,3 MM	3,8 mm Durchmesser x 0,3 mm		
RA 0055	REVAX M2-PLATZHALTER GROSS 0,4 MM	14 mm Durchmesser x 0,4 mm		
RE 0096	REVAX M2-PLATZHALTER	3,2 mm Durchmesser x 0,3 mm		
1101/PH	PRECI-BAR-PLATZHALTER GROSS	50 mm x 1,1 mm x 2 mm	9,0 cm <sup>3</sup>	342 MPa
1103/PH	PRECI-BAR-PLATZHALTER KLEIN	50 mm x 0,75 mm x 1.5 mm	9,0 cm <sup>3</sup>	342 MPa

VERWENDETES MATERIAL	ZUSAMMENSETZUNG
Kupfer	Cu – ETP (CW004A) 99,9 Rest Bi, Pb, O
Edelstahl	Fe 74,4 – C 0,1 – Cr 17 – Cu 0,2 – Mn 0,9 – Mo 0,1 – Ni 6,7 – P 0,03 – S 0,002 – Si 0,6
EPDM	Ethylen-Propylen-Dien-Monomer (synthetischer Kautschuk) ISO 1629
Zinnlegierung	Sn 49,91 – Pb 50,02 – (Rest Cu-Ag-Cd-Sb-Bi-Fe-Zn-Al-As-Co-Ni-In-S-Te)

## KURZANLEITUNG UND BEISPIELE FÜR DIE VERWENDUNG VON PLATZHALTERN

REF./PRODUKT-NUMMER	PLATZHALTER UND ENTSPRECHENDE PRODUKTGRUPPE	VERWENDUNG DES PLATZHALTERS
1251 B	Platzhalter für PRECI-CLIX	Siehe IFU PRECI-LINE-Patrize/Matrize
694 B	Platzhalter für CEKA	Siehe IFU CEKA-Druckknopf
RA 0055	Platzhalter für PRECI-CLIX und CEKA	Siehe IFU PRECI-LINE-Patrize/Matrize Siehe IFU CEKA-Druckknopf
RE 0096	Platzhalter für CEKA	Siehe IFU CEKA-Druckknopf
1101/PH	Platzhalter für PRECI-BAR	Siehe IFU PRECI-LINE-Patrize/Matrize
1103/PH	Platzhalter für PRECI-BAR	Siehe IFU PRECI-LINE-Patrize/Matrize



ALPHADENT NV  
Mannebeekstraat 33  
8790 Waregem, Belgium  
T +32 56 629 531



# Gebrauchsanweisung

## Platzhalter

Ref. [TF26]

[Hilfsteile]

Revisionsdatum: [02/10/2023]

REF./PRODUKT-NUMMER	BESCHREIBUNG	BILD	BEISPIEL DER VERWENDUNG DES PLATZHALTERS	ANLEITUNG
1251 B	PRECI-CLIX-PLATZHALTER		Abb. 1  Abb. 2 	Legen Sie den schwarzen Platzhalter (Abb. 1) über die Patrize. Drücken Sie die Matrize darüber (Abb. 2). Blocken Sie den untersichgehenden Bereich aus. Die Oberfläche der Stiftwurzelkappe kann ggf. auch mit dem mitgelieferten Platzhalter aus Zinnfolie (RA 0055) abgedeckt werden.
694 B	CEKA M3-PLATZHALTER		Abb. 3  Abb. 4 	Verwenden Sie den Platzhalter beim Ausblocken mit dem Dublierhilfsteil (Abb. 3) bzw. beim Zementieren des Metallgerüsts mit dem kompletten Attachment (Abb. 4).
RE 0096	REVAX M2-PLATZHALTER		Abb. 5  Abb. 6 	Für Service und Nachsorge wird der Platzhalter während der Abformung (Abb. 6) verwendet, um den korrekten Sitz des kompletten Attachments zu sichern.
1101/PH	PRECI-BAR-PLATZHALTER GROSS		Abb. 7 	Legen Sie den Platzhalter aus Metall zwischen den Steg und den Reiter (Abb. 7) beim Einpolymerisieren des Stegreiters in die Prothese, um Resilienz zu erhalten. Entfernen Sie anschließend den Platzhalter.
1103/PH	PRECI-BAR-PLATZHALTER KLEIN		Abb. 8 	Legen Sie den Platzhalter aus Metall zwischen den Steg und den Reiter (Abb. 8) beim Einpolymerisieren des Stegreiters in die Prothese, um Resilienz zu erhalten. Entfernen Sie anschließend den Platzhalter.
RA 0055	REVAX M2-PLATZHALTER		Abb. 9 	Verwenden Sie den Platzhalter beim Zusammensetzen und Ausblocken, um Resilienz der Prothese zu erhalten (Abb. 9). Der Platzhalter aus Zinnfolie wird anschließend entfernt.

## NACHSORGE

Alle Teile, die zu einer prothetischen Versorgung gehören, sind verschiedenen intraoralen Einflüssen wie Kaukräften, Bruxismus und Mundhygiene ausgesetzt.



ALPHADENT NV  
Mannebeekstraat 33  
8790 Waregem, Belgium  
T +32 56 629 531



# Gebrauchsanweisung

**Platzhalter**

Ref. [TF26]

[Hilfsteile]

Revisionsdatum: [02/10/2023]

Es ist wichtig, regelmäßig einen Zahnspezialisten für eine gründliche Kontrolle der prothetischen Rehabilitation aufzusuchen. Ziel der korrekten regelmäßigen Nachsorge dieser prothetischen Versorgung ist es, übermäßigen Verschleiß oder Bruch der Prothese und ihrer Bestandteile zu vermeiden oder zumindest auf ein Minimum zu reduzieren. Die optimale Passgenauigkeit der Prothese stellt sicher, dass die verwendeten Qualitätsprodukte, die als Grundlage für den Halt des Attachments dienen, den Tragekomfort sowie die aktive Nutzung der Prothese positiv beeinflussen.

Der Fachzahnarzt ist daher der richtige Ansprechpartner, um Ihnen bei der Kontrolle des Zahnersatzes und aller dazugehörigen Komponenten die nötige Sorgfalt zukommen zu lassen.

Wir empfehlen, mindestens einmal im Jahr eine Kontrolluntersuchung vornehmen zu lassen. Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website oder Sie können sich an den Zahnspezialisten wenden.

## **AKTIVIERUNG / DEAKTIVIERUNG**

Die Platzhalter werden verwendet, um während der Herstellung der prothetischen Versorgung Resilienz der kompletten Attachments zu erhalten. Nach Eingliederung der Zahnprothese sind die Produkte weder Teil des Attachments noch kommen sie beim Aktivieren bzw. Deaktivieren des Attachments zum Einsatz.

## **ÄNDERUNGEN / UNTERFÜTTERUNG**

Die Platzhalter werden verwendet, um Resilienz der kompletten Attachments zu erhalten und können daher bei Service- und Nachsorgeverfahren eingesetzt werden, um die korrekte Platzierung bzw. Wiedereingliederung des kompletten Attachments zu gewährleisten.

## **PFLEGE UND REINIGUNG (PATIENT)**

Die Platzhalter sind nicht Teil des Zahnersatzes, sondern werden nur zum Einbauen des komplettierten Attachments in den Zahnersatz verwendet. Bitte befolgen Sie für die Nachsorge die Desinfektionshinweise.

Reinigen Sie Ihre Zähne und Ihren Zahnersatz idealerweise nach jeder Mahlzeit. Zur Reinigung des Zahnersatzes gehört auch das Reinigen des Verbindungselementes. Die schonendste Reinigung erzielen Sie, wenn Sie das Verbindungselement unter fließendem Wasser mit einer weichen Zahnbürste säubern. Die intensivste Reinigung erreichen Sie, wenn Sie den Zahnersatz in einem kleinen Ultraschallgerät mit einem geeigneten Reinigungszusatz reinigen. Die hochpräzisen Verbindungselemente dürfen Sie nie mit Zahnpaste reinigen, weil das zu Beschädigungen führen könnte. Vorsicht ist auch geboten bei ungeeigneten Reinigungsmitteln oder -tabletten. Auch dies könnte das hochwertige Verbindungselement beschädigen oder in seiner Funktion beeinträchtigen. Die Verbindungsteile an den Restzähnen oder Implantaten reinigen Sie ausschließlich mit Wasser und einer weichen Zahnbürste sowie einer Interdentalbürste. Nehmen Sie keine Zahnpaste, so vermeiden Sie Beschädigungen des Verbindungselements.

Achten Sie auf eine regelmäßige Reinigung des Attachments, um eine Entzündung des Weichgewebes zu vermeiden.



ALPHADENT NV  
Mannebeekstraat 33  
8790 Waregem, Belgium  
T +32 56 629 531



# Gebrauchsanweisung

**Platzhalter**

Ref. [TF26]

[Hilfsteile]

Revisionsdatum: [02/10/2023]

Für Auskünfte und zusätzliche Informationen wenden Sie sich bitte Ihre CEKA PRECI-LINE-Vertretung.

## HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Mit der Veröffentlichung dieser Gebrauchsanweisung verlieren alle früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.

Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch Nichtbeachtung der oben genannten Gebrauchsanweisung durch den Benutzer entstehen.

Diese Platzhalter sind Teil eines Gesamtkonzepts und dürfen nur mit den entsprechenden Originalkomponenten und -hilfsmitteln verwendet oder kombiniert werden. Ist dies nicht der Fall, wird jegliche Haftung des Herstellers abgelehnt.

Bei schwerwiegenden Zwischenfällen wenden Sie sich bitte an ALPHADENT NV und an die zuständige Behörde des Mitgliedstaates, in dem der Benutzer und/oder Patient ansässig ist.

Bei Reklamationen muss immer die Lotnummer angegeben werden.



ALPHADENT NV  
Mannebeekstraat 33  
8790 Waregem, Belgium  
T +32 56 629 531

E [info@ckpl.eu](mailto:info@ckpl.eu)



Seite 13 von 13